

Compeed plastry na odciski między palcami *10 szt.



Cena: 24,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 szt.
Postać	-
Producent	JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Nazwa: Plaster Compeed na odciski między palcami

Opakowanie: 10 szt.

Opis produktu: Plastry na odciski- między palcami zawierają aktywny żel, który przynosi natychmiastową ulgę w bólu i pomaga usunąć odciski. Pozostają na miejscu ponad 24 godziny dostarczając optymalnej ochrony przed otarciami i uciskiem. Specjalny kształt zapewnia właściwe dopasowanie.

Sposób użycia: umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem. Upewnij się czy skóra dotknięta odciskiem nie jest tłusta od kremu bądź oliwki. Usuń górną warstwę papierową, potem dolną warstwę papierową starając się unikać dotykania warstwy samoprzylepnej. Nałóż plaster mocno na odcisk, upewniając się, czy brzegi plastra są dobrze dociśnięte do skóry. Pozostaw plaster na odcisku, aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać. Dla otrzymania lepszych rezultatów używaj COMPEED aż do czasu kiedy skóra będzie całkowicie wyleczona z odcisku.

Status: Wyrób medyczny