

# Lapis Diabelski Kamyk sztyft do usuwania brodawek 1 szt.



Cena: 26,98 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt. (laseczka)
Postać	sztyft
Producent	SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	Argenti nitras

## Opis produktu

**Skład:** 97 części azotanu srebra, 3 części azotanu potasu

**Opis produktu:** Azotan srebra stanowiący podstawowy składnik sztyftu skutecznie wspomaga gojenie uszkodzeń skóry. Sztyft azotanu srebra jest stosowany pomocniczo w leczeniu niektórych zmian skórnych pochodzenia wirusowego: brodawek zwykłych oraz kłykcin kończystych.

**Sposób użycia:** przed zastosowaniem produktu zdjąć nakrętkę ochronną. Przed nałożeniem produktu na zmieniony chorobowo obszar usunąć ochronną warstwę parafiny zanurzając koniec sztyftu w ciepłej wodzie o temperaturze 30-37 st. Celsjusza przez 10-20 sekund. Zanurzyć w wodzie jedynie część sztyftu, którą szacunkowo zużyjemy. Lapis wcierać w chore miejsce 1-2 razy dziennie do momentu ustąpienia zmian. Produkt wcierać wyłącznie w powierzchnię brodawki.

**Przeciwwskazania:** nie stosować razem z innymi preparatami do leczenia kurzajek; nie stosować u dzieci poniżej 4 lat; nie stosować na znamiona, ciemne plamy na skórze, piegi, brodawki wodne i brodawki łojotokowe.

**Uwaga:** Wyrób medyczny leczniczy